

Retractor de Labios Frontal para Estética



- Materia prima flexible que ofrece confort
- Estabilidad perfecta en la boca del paciente
- Bordes redondeadas
- Esterilización química

RETRACTOR DE LABIOS FRONTAL PARA ESTÉTICA: Muy flexible, aleja los labios y destaca los dientes. Su ajuste perfecto permite seguridad y la posibilidad de realizar procedimientos clínicos tales como restauraciones y blanqueamientos.

INDICACIÓN: Se usa para alejar los labios en la región de los dientes anteriores.

INSTRUCCIONES DE USO: Humedezca los labios del paciente; lleve el retractor de labios frontal para estética en la boca del paciente. Encaje primer de un lado y después el otro en la boca del paciente; el paciente debe cerrar la boca para mantener el producto en posición.

LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.

DESINFECCIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

ESTERILIZACIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% durante una hora por inmersión. Después de retirar el producto sumergido en la solución, se lava en agua destilada estéril y se secó con una gasa estéril. Usando el Equipo de Protección Personal, siendo las guantes estériles para este procedimiento. Repetir el proceso para cada uso.

ACONDICIONAMIENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

COMPOSICIÓN: Polietileno.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código

Descripción

Presentación

ANVISA

102063200620

Retractor de Labios Frontal para
Estética

1 unidad

180213420029



Indusbelo Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira