



indusbello


innovación para una vida saludable



Espejo Metálico




IBM001

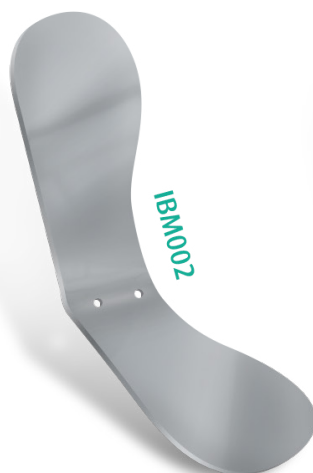


IBM002




IBM003

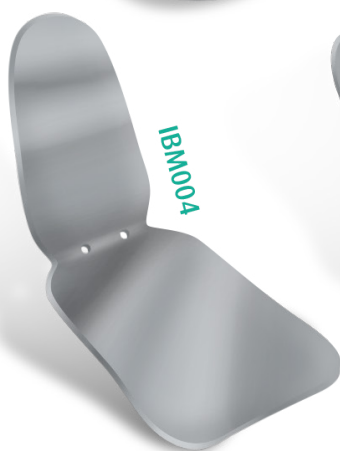

IBM004

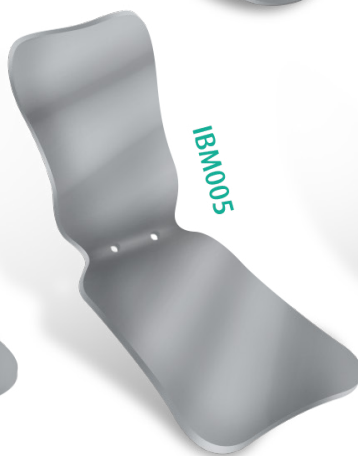

IBM005

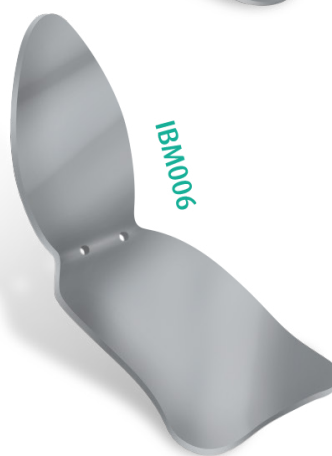

IBM006

- Reflexión de imagen perfecta
- Bordes Redondeadas
- Ajuste perfecto en la boca
- Más confort para el paciente

ESPEJO METÁLICO: Permite la reflexión de imagen perfecta, tiene bordes redondeados que permiten el ajuste de la boca del paciente sin causar daños. Durante el procedimiento, el lado que no está siendo utilizado como mango evitará que las manos que entran en el ámbito de la cámara de visión.

INDICACIÓN: Instrumento manual usado para la fotografía oral.

Espejo IBM 001 Oclusal adulto y infantil

Espejo IBM 002 Lingual

Espejo IBM 003 Lateral

Espejo IBM 004 Oclusal adulto y lateral

Espejo IBM 005 Oclusal adulto y infantil

Espejo IBM06 Oclusal Infantil y lateral

INSTRUCCIONES DE USO: Lleve el espejo metálico a la boca del paciente. Mantenga en la posición ideal. Saque la foto. Después del uso, conserve el Espejo Metálico dentro del paquete de tejido que acompaña al producto.

LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.

DESINFECCIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

ESTERILIZACIÓN: Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

ACONDICIONAMIENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

COMPOSICIÓN: Latón cromado.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compruebe un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código

Descripción

Presentación

ANVISA

106210101008

Espejo Metálico Kit IBM001, IBM002 e IBM003

1 Kit

180213420017

106210101009

Espejo Metálico IBM001

1 unidad

106210101010

Espejo Metálico IBM002

1 unidad

106210101011

Espejo Metálico IBM003

1 unidad

106210101012

Espejo Metálico IBM004

1 unidad

106210101013

Espejo Metálico IBM005

1 unidad

106210101015

Espejo Metálico IBM006

1 unidad



Indusbelo Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira