

DISA INFORMA

Estimados clientes

Ante la grave situación sanitaria generada por la pandemia del COVID 19, hemos detectado la aparición de un anticipado deterioro en algunos de nuestros productos.

El uso frecuente de desinfectantes por inmersión que pueden variar su PH en corto tiempo tornándose a un medio "ácido", ha demostrado ser la causa principal de dicho inconveniente. Por lo tanto en caso de emplearlos, sugerimos su permanente renovación a fin de evitar el deterioro del material.

Desde DISA recomendamos.

- Nunca someter los alicates a los efectos del auto clavado, las condiciones de presión, humedad y temperatura no solo destruyen agentes patógenos, sino que deterioran todo tipo de material metálico que es sometido a dicho proceso.
- Higienizar el instrumental con abundante agua y jabón utilizando un cepillo de mano para efectivizar el proceso, rociar con alcohol al 70% y secar con un paño de tela o servilleta de papel. O bien, el uso de estufa seca como método adecuado de esterilización y secado de los alicates.
- Lubricar periódicamente los mismos con aceite de turbina de mano, o en su defecto con vaselina o glicerina líquida.

MUCHAS GRACIAS